


STRECK Cell-Free DNA BCT-putkien säilytys- ja käyttöohje

Putket sisältävät säilytysliuosta, joka stabiloi soluvapaata DNA:ta ja estää tumallisia soluja hajoamasta.

1. Tyhjät näytteenottoputket tulee säilyttää huoneenlämmössä. Mikäli putkessa näkyy sameutta tai saostumaa, älä käytä putkea.
2. Ota näyte laskimopistoksena. Parhaita tuloksia varten suositellaan 21G- tai 22G-neulaa.
3. Takaisinvirtauksen esto – Koska putki sisältää kemiallisia lisäaineita, takaisinvirtausta putkesta verenkiertoon on vältettävä.

Estä takaisinvirtaus noudattamalla seuraavia varotoimia:

- a. Pidä potilaan käsivarsi ala-asennossa näytteen ottamisen aikana.
 - b. Pidä tulppallista putkea pystysuorassa niin, että putken sisältö ei koske tulppaa tai neulan kärkeä näytteen ottamisen aikana.
 - c. Irrota kiristyside heti, kun veri alkaa virrata putkeen, tai viimeistään kahden minuutin kuluttua sen kiristämisestä.
5. Jos näytteenotossa käytetään siipineulaa, otetaan ensin joko lisäaineeton tai EDTA-putki hukkaan ennen Cell-Free DNA BCT CE -putkea, jotta voidaan välttää putkista tuleva ilma ja vastaavat.
 4. Näytteenottojärjestys mikäli otetaan myös muita näytteitä: Cell-Free DNA BCT CE -putki on täytettävä EDTA-putken jälkeen ja ennen fluoridioksalaattiputkea (glykolyysin inhibiittoriputki). Jos Cell-Free DNA BCT CE -putki täytetään heti hepariiniputken jälkeen, otetaan hukkaputki (lisäaineeton tai EDTA) ennen Cell-Free DNA BCT-putkea.
 5. Täytä putki kokonaan (10 ml).
 6. Poista putki sovittimesta ja sekoita heti kääntämällä sitä varoen ylösalaisin 8–10 kertaa. Riittämätön tai viivästynyt sekoitus saattaa aiheuttaa virheellisiä analyysituloksia tai tuotteen heikentynyttä suorituskykyä. Yksi kääntämiskerta tarkoittaa ranteen kääntymistä 180 astetta ja takaisin alkuasentoon alla kuvatulla tavalla:

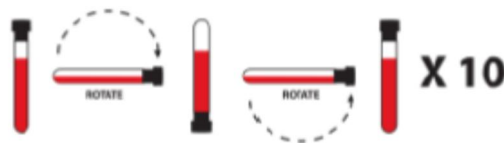

7. Kun näyte on otettu, putki säilytetään huoneenlämmössä. Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin.
8. Putket tulee toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä viiden päivän sisällä näytteenotosta. Näytteitä sisältävien postipakettien päälle tulee lisätä merkinnät "kiireellinen" ja "säilytettävä huoneenlämmössä". Kuljetuksen aikana putket eivät saa jäätyä tai lämpötila nousta yli 40°C:n.

9. Varhan alueen näytteet:

- a. Näytekuljetuksessa huomioitava: näytteet pakataan erikseen kuljetuskoteloon ja kirjataan omaan lähetyserälistään. Pakkauksen päälle tieto: EI PUTKIPOSTIIN!

RAJOITUKSET: 1. Cell-Free DNA BCT CE -putki on kertakäyttöinen. 2. Näytteitä ei saa kuljettaa putkipostijärjestelmässä.

Putkien tilaukset: Genomiikan toimisto, puh. 050-4068150 (dect 37462)

10.6.2024